

Conjuntos de Conectores-Y [INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO]

1. UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

O produto em questão diz respeito a material auxiliar a procedimentos de angioplastia percutânea.

2. CONTRAINDICAÇÕES

Sem quaisquer contra-indicações a apresentar.

3. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Armazenar o produto num local bem-ventilado, limpo e seco, de humidade relativa inferior a 80% e longe de gases corrosivos.

4. COMPONENTES

O produto inclui um conector-Y, um dispositivo de torque de fio-guia, uma cânula guia, e um revestimento de proteção.

5. DESEMPENHO DO PRODUTO

O produto possibilita a criação de uma via de acesso de forma rápida e conveniente durante a angioplastia percutânea. Os produtos auxiliares podem ser utilizados para a inserção do fio-guia no cateter, e revelam-se como sendo materiais flexíveis e de fácil utilização.

6. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Retire o produto da embalagem; caso a embalagem esteja danificada, não utilize o produto.
2. Acople o conector-Y à porta do cateter e introduza a cânula guia.
3. Utilize o dispositivo de torque para empurrar o fio-guia através do cateter.

STERILE
EO

Esterilização por Óxido de Etileno (OE)



Não reutilizar



Aviso



Manter seco



Se detetar algum tipo de danos, não utilize o produto



Manter afastado da luz solar



Limite de temperatura



Usar até

LOT

Código do lote

7. RÓTULO DO PRODUTO E EMBALAGEM (Consultar o rótulo ou a embalagem)

1. Nome do produto, modelo e especificações.
2. Data de fabrico, lote.
3. Data de expiração da esterilização.

 REF

Número de catálogo



Fabricante




Data de fabrico

LEIA AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO

MATERIAIS

8. AVISO

- Os procedimentos devem ser levados a cabo por profissionais de saúde devidamente treinados para o efeito.
- A esterilização é válida num período de três anos. Por favor, confirme a data de esterilização antes do uso e não utilize o produto após a data de expiração.
- Este dispositivo destina-se somente a uma UTILIZAÇÃO ÚNICA.
- Não tente reutilizar ou esterilizar novamente o produto, sob risco de infeção dos doentes. Após a utilização, desfaça-se do produto e da embalagem, de acordo com as orientações de eliminação de resíduos hospitalares infecciosos.
- Esterilização por Óxido de Etileno. Se detetar algum tipo de danos, não utilize o produto.

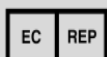

Brosmed Medical B.V.

ENDEREÇO: Mgr.Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Países Baixos

TEL: +31 850140901

Mail: cs@brosmed.com

BrosMed Medical Co., Ltd.

ENDEREÇO: 15th building, SMEs Venture Park SongShan Lake Hi-Tech Industrial

Development Zone Dongguan 523808, China

TEL: +86(769) 22892018

FAX: +86(769) 2289 2016

WEB: www.brosmed.com

GRA-4093, REV02/DCR20-0177